

## COLETOR PARA ASPIRAÇÃO DAS VIAS AÉREAS

### 1. INDICAÇÃO DO PRODUTO:

Produto indicado para coleta de secreções, por aspiração das vias aéreas.

### 2. DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

Frasco em PVC cristal rígido; extensões em PVC cristal atóxico identificadas como “vácuo” e “paciente”; pinça (clamp regulável); tampa protetora; extremidade flexível e alça de sustentação em PVC.

Volumes:

250 ml, 500 ml, 1000 ml e 2000 ml.

### 3. INSTRUÇÕES DE USO:

- 3.1. Examine o produto antes de utilizá-lo.
- 3.2. Verifique as identificações fixadas nas extensões.
- 3.3. Conecte a extremidade flexível da extensão, identificada com a etiqueta “vácuo”, à rede de aspiração.
- 3.4. Conecte a extremidade da extensão, identificada com a etiqueta “paciente”, ao cateter de aspiração. Proceda à aspiração.
- 3.5. No modelo Sterzamm, a conexão do frasco é feita diretamente no vacuômetro fixado à rede de vácuo.
- 3.6. Fixe o frasco através da alça.
- 3.7. Proceda à aspiração.
- 3.8. Troque o frasco quando necessário.
- 3.9. Troca do frasco Avazamm:
  - 3.9.1. Feche a pinça (clamp regulável).
  - 3.9.2. Desconecte a extremidade flexível em da sonda de aspiração.
  - 3.9.3. Tampe a extremidade com o protetor.
  - 3.9.4. Remova o conector da linha de vácuo.
  - 3.9.7. O fabricante recomenda uso único. Descarte o frasco.
  - 3.9.8. Proceda como em 3.1 a 3.8, para continuar o processo de aspiração.
- 3.10. Troca do frasco Sterzamm:
  - 3.10.1. Feche a pinça (clamp regulável).
  - 3.10.2. Desconecte a extremidade flexível da sonda de aspiração.
  - 3.10.3. Tampe a extremidade com o protetor.
  - 3.10.4. Remova o conector Sterzamm do vacuômetro.
  - 3.10.5. Feche o canal de aspiração externa do vacuômetro com a tampa de PVC.
  - 3.10.6. Coloque o protetor no conector Sterzamm.
  - 3.10.7. O fabricante recomenda uso único. Descarte o frasco
  - 3.10.8. Proceda como em 3.1 a 3.8, para continuar o processo de aspiração.

### 4. PRECAUÇÕES:

- 4.1. Verifique cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade. As condições de esterilidade e apirogenicidade estarão asseguradas, dentro do prazo de validade, desde que a embalagem não esteja violada e/ou danificada. O produto deve ser examinado atentamente. Acidentes de transporte e/ou estocagem inadequada podem provocar danos e/ou vazamentos. Em caso de dúvidas, comunique imediatamente ao fabricante para que providências sejam tomadas.
- 4.2. Para evitar que haja obstrução da extensão, lave-a com água destilada, através da aspiração, até que toda secreção seja removida.
- 4.3. Mantenha o frasco na posição vertical. Atenção quanto ao volume das secreções nos frascos.
- 4.4. Mantenha as pinças (“clamps” reguláveis) fechadas após o uso, bem como ao desprezar o produto.
- 4.5. Não abra o frasco. Evite contato com as secreções.
- 4.6. Verifique se não há vazamento nas conexões.
- 4.7. Modelo Sterzamm:
  - 4.7.1. Certifique-se de que o anel de borracha (o’ring) para vedação do vacuômetro estejam em bom estado e posicionado devidamente em seu alojamento, para que o produto seja utilizado de forma eficaz.
  - 4.7.2. O tampão de PVC que acompanha o Sterzamm deve ser obrigatoriamente utilizado na conexão externa da aspiração do vacuômetro.
- 4.8. O fabricante recomenda uso único ou por período máximo de 24 horas. Lembre-se: produtos descartáveis evitam riscos maiores de contaminação.
- 4.9. É recomendado ao usuário conferir criteriosamente o produto. Danos provocados por transporte e/ou armazenagem inadequados não são de responsabilidade da empresa.
- 4.10. A Zammi Instrumental EIRELI não é responsável por danos causados por inexperiência ou utilização imprópria. O usuário é responsável pelo uso inadequado ou diferente do recomendado.

### 5. CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE:

- 5.1. Evite calor excessivo.
- 5.2. Proteja da luz e umidade.

### 6. ACONDICIONAMENTO:

Produto acondicionado em filme de polipropileno/ poliéster e papel grau cirúrgico. Cada embalagem contém 01 unidade do produto. Estéril.

**Fabricado por:**

**ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI.**

Rua Bernardo Vasconcelos, 992- Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25251-300

Telefone: (21) 2677-1500 - comercial@zammi.com.br

CNPJ: 30.450.803/0001-09 - I.E: 82.340.777 – AFE: 1021635

Responsável Técnico: Eng.º Luiz Henrique Vargas Fonseca – CREA-RJ: 1992101441

“O fabricante recomenda uso único”.

Esterilizado a Óxido de Etileno.

Estéril, se a embalagem não estiver violada.

Leia cuidadosamente as instruções antes de usar o produto

Nº DE CADASTRO ANVISA: 10216350091

Para mais informações sobre nossos produtos, instruções de uso e catálogos acesse nosso site:  
[www.zammi.com.br](http://www.zammi.com.br)