

## TAMPA MULTIZAMM PERDURA

### 1. DESCRIÇÃO

Tampa para o frasco Multizamm Perdura, apresenta duas vias, extensões de entrada e saída, estéril, com válvula de segurança e anel de vedação.

### 2. PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO


Aspiração de secreções do campo cirúrgico para depósito em Frasco Multizamm Perdura.

### 3. INDICAÇÃO DO PRODUTO

Procedimento de aspiração de fluidos e secreções corporais em procedimentos cirúrgicos em ambiente hospitalar.

### 4. COMPOSIÇÃO

1. Tampa Multizamm
2. Extensão Paciente
3. Extensão Vácuo
4. Pinça
5. Válvula de segurança
6. Conector reto
7. Conector flexível
8. Anel de vedação
9. Etiqueta de identificação "PACIENTE"

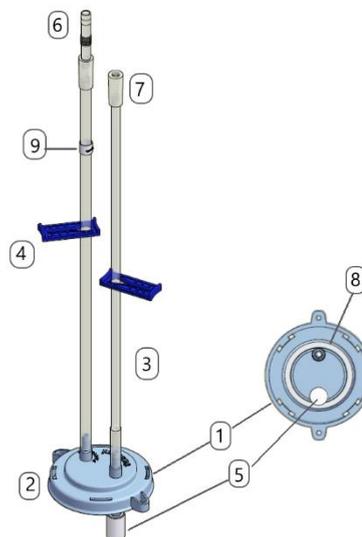

### 5. INSTRUÇÃO DE USO

- 5.1. Verificar a integridade da embalagem e a validade do produto antes de usar;
- 5.2. Abra a embalagem, acople a tampa a um frasco modelo Multizamm Perdura e certifique-se de que o acoplamento esteja bem realizado;
- 5.3. Conecte a extensão identificada como PACIENTE a linha de aspiração do campo cirúrgico ou a sonda de aspiração no caso de procedimento orotraqueal;
- 5.4. Conecte a outra extensão PVC à fonte de vácuo. Certifique de que as extensões estejam livres;
- 5.5. Abra a fonte de vácuo para iniciar o procedimento;
- 5.6. Realize o procedimento;
- 5.7. Após a utilização, descarte o conteúdo coletado de acordo com o plano de Gerenciamento de Resíduo do hospital;
- 5.8. Descarte a Tampa Multizamm como RSS tipo A1.

## 6. ADVERTÊNCIAS, PRECAUÇÕES, RECOMENDAÇÕES E RESTRIÇÕES

### 6.1. ADVERTÊNCIAS

- 6.1.1. Esse produto é para uso exclusivo com frasco de coleta Multizamm Perdura.
- 6.1.2. O produto deve ser utilizado por profissional habilitado.
- 6.1.3. O fabricante não se responsabiliza por danos causados por inexperiência ou utilização imprópria.
- 6.1.4. Abrir a embalagem somente no momento do uso.
- 6.1.5. Verifique cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade.
- 6.1.6. Esse produto deve ser utilizado exclusivamente com o Frasco Multizamm Perdura.
- 6.1.7. Mantenha mais de uma unidade da Tampa Multizamm Perdura disponível na sala de cirurgia para o caso de precisar substituí-la durante a cirurgia.
- 6.1.8. Caso necessite substituir o frasco durante a cirurgia, realize a troca de frascos antes do enchimento completo do frasco.
- 6.1.9. Quando o frasco for totalmente preenchido, o dispositivo de segurança da tampa Multizamm Perdura irá interromper o fluxo de sucção. Quando isso ocorrer, será necessário o uso de uma nova tampa Multizamm Perdura.
- 6.1.10. A válvula de segurança não deve ser removida.
- 6.1.11. Se a válvula de segurança for removida afetará a segurança da rede de vácuo.

### 6.2. PRECAUÇÕES

- 6.2.1. Certifique-se de que a tampa está adequadamente rosqueada ao frasco de coleta para garantir a vedação entre tampa e frasco.
- 6.2.2. O anel de vedação pode se deslocar e ficar mal posicionado no momento do acoplamento com o frasco.
- 6.2.3. A válvula de segurança pode ser deslocada da sua posição original na saída da tampa.

### 6.3. RECOMENDAÇÕES

- 6.2.1. Antes de usar verifique na embalagem, se a válvula de segurança está posicionada corretamente na via de saída do vácuo.
- 6.2.2. Recomenda-se abrir a embalagem do produto no momento da utilização.
- 6.2.3. O Fabricante recomenda uso único.

### 6.4. RESTRIÇÕES

- 6.4.1. Este produto deve ser utilizado somente em ambiente médico-Hospitalar.
- 6.4.2. Este produto somente deve ser utilizado sob prescrição médica.

## 7. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- 7.1. Conservar o produto em local limpo, fresco e seco, à temperatura ambiente.

## 8. ACONDICIONAMENTO

A tampa Multizamm Perdura é embalada em embalagem estéril, cada embalagem contém uma unidade do produto.

## 9. DESCARTE

O usuário deve seguir as orientações da Resolução RDC nº 222, de 28 de março de 2018 que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde ou outro regulamento específico aplicável, vigente.

Obs: O Regulamento supracitado aplica-se a todos os geradores de Resíduos de Serviços de Saúde-RSS e não

se aplica a fontes radioativas seladas, que devem seguir as determinações da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN, e às indústrias de produtos para a saúde, que devem observar as condições específicas do seu licenciamento ambiental.

### FABRICADO POR

#### **ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI.**

Rua Bernardo Vasconcelos, 992- Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25251-300

Telefone: (21) 2677-1500 - E-mail: zammi@zammi.com.br

CNPJ: 30.450.803/0001-09 – I.E: 82.340.777 – ANVISA: 1021635

Responsável Técnico: Eng.º Luiz Henrique Vargas Fonseca - CREA-RJ: 1992101441

Produto isento de látex.

Produto Estéril.

Nº DE CADASTRO ANVISA: 10216350118

Para mais informações sobre nossos produtos, instruções de uso e catálogos acesse nosso site:

[www.zammi.com.br](http://www.zammi.com.br)