

CANETA PARA MARCAÇÃO CIRÚRGICA ZAMMI SKS

 - Leia as instruções antes do uso.

 - Orientação de abertura da embalagem.

 - Não reutilize – O fabricante recomenda uso único

Estéril - Raio gama

1. Indicação:

Para uso exclusivo na marcação da pele dos pacientes antes de cirurgias. Uso médico.

À base de violeta genciana – Não tóxico – Não irritante.

Contra- indicação:

Não recomendado para pacientes que sejam sensíveis à violeta genciana.

2. Precauções/Orientações:

Verificar cuidadosamente o estado da embalagem, do produto e o prazo de validade.

As condições de esterilidade estarão asseguradas, dentro do prazo de validade, desde que a embalagem não esteja violada, danificada e/ou úmida.

O produto deve ser examinado atentamente.

Manuseio inadequado pode provocar danos.

Não utilize a mesma caneta para marcação cirúrgica em diferentes pacientes. Evite infecções. Teste antes de utilizar o produto em pacientes que sejam sensíveis à violeta genciana.

Utilize cautelosamente em mucosas ou peles feridas.

3. Orientação de uso/Atenção:

Limpe e seque a pele. Se possível, use iodo para desinfetar a pele e fixar as marcações.

Use álcool ácido diluído na remoção da tinta.

Estocagem:

Vide impresso na caixa

Fabricado por:

Shanghai Kearing Stationery Co.,Ltd Team 3, Yingqian Village, Chuansha Town, Pudong, 201202, Shanghai - China

Importado e distribuído por:

ZAMMI INSTRUMENTAL LTDA.

Rua Bernardo Vasconcelos, 992- Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25251-300

Telefone: (21) 2677-1500 - zammi@zammi.com.br

CNPJ: 30.450.803/0001-09 - I.E: 82.340.777 – AFE: 1021635

Responsável Técnico: Eng.º Luiz Henrique Vargas Fonseca – CREA-RJ: 1992101441

"Produto dispensado de regularização"

De acordo com Resolução-RE N° 4.626 de 9 de dezembro de 2021.

Para mais informações sobre nossos produtos, instruções de uso e catálogos acesse nosso site:

www.zammi.com.br

Atenção: Observar o número de controle da versão: IFU.00 - 10216350107