

EXTENSÃO HOSPITALAR ZAMMI

tubo de extensão para centro cirúrgico

1. Descrição

Tubo de PVC transparente com conector nas extremidades e várias opções de comprimento e diâmetro, utilizá-lo para condução de fluidos ou gases em procedimentos cirúrgicos.

Produto estéril, atóxico, biocompatível e descartável.

2. Princípio de funcionamento

A Extensão funciona como uma ligação intermediária entre a fonte de gás ou vácuo a um dispositivo remoto para o uso final.

3. Indicação

Produto indicado para procedimentos médicos que necessitem de conexão, entre linhas de vácuo ou gás, aos dispositivos médicos a serem utilizados.

4. Composição

Extensão e conector em PVC.

Especificações disponíveis no site da empresa.

5. Instrução de uso

- Verifique o modelo do produto;
- Verifique a integridade da embalagem do produto;
- Verifique o prazo de validade no rótulo da embalagem;
- Para utilização em campo estéril, abra a embalagem com técnica asséptica;
- Abra a embalagem cuidadosamente utilizando a borda abre fácil;
- Conecte as extremidades a fonte e ao terminal de uso;
- Certifique-se da firmeza das conexões;
- Descarte após o uso.

6. Advertências

- Este produto deve ser utilizado por pessoal habitado e treinado para seu manejo.
- O usuário é responsável pelo uso inadequado ou diferente do recomendado.
- Não utilize se a embalagem estiver danificada ou violada.
- Não utilize se a validade da esterilização estiver vencida.
- Não utilize em caso de contaminação acidental.
- O FABRICANTE não se responsabiliza por danos causados por inexperiência ou utilização imprópria.
- O FABRICANTE recomenda uso único.
- O FABRICANTE não se responsabiliza pelo uso diferente da indicação de uso na instrução de uso.

7. Precauções

- Leia e siga as instruções de uso, as advertências e precauções para o uso do produto.
- Cerifique-se do modelo do produto pela identificação do rótulo.
- Abra a embalagem no momento do uso.

8. Acondicionamento

Produto embalado em filme de polipropileno/poliéster e papel grau cirúrgico.
Cada embalagem contém 01 unidade estéril do produto.

9. Cuidados de conservação e transporte

- Evite calor excessivo. Proteja da luz direta do sol e de umidade.
- O produto deve ser transportado em caixa de papelão ondulado para transporte.
- O transporte deve ser realizado em caminhões de carroceria fechada próprio para transporte de cargas sensíveis a umidade, temperatura, luminosidade e manuseio.
- O contêiner de transporte deve ser sanitizado e apropriado para transporte de produtos médico-hospitalares estéreis e proteção do produto contra danos na barreira estéril da embalagem.

10. Descarte

Descartar o produto de acordo com a RDC nº 222 ANVISA.

Fabricado por:

ZAMMI INSTRUMENTAL EIRELI

Rua Bernardo Vasconcelos, 992- Parque Santa Lúcia - Duque de Caxias - RJ – CEP: 25251-300

Telefone: (21) 2677-1500 CNPJ: 30.450.803/0001-09 – I.E: 82.340.777 – ANVISA: 1021635

Responsável Técnico: Eng.º Luiz Henrique Vargas Fonseca – CREA-RJ: 1992101441

Esterilizado a Óxido de Etileno. Produto isento de látex.

“O FABRICANTE RECOMENDA USO ÚNICO”

Nº DE CADASTRO ANVISA: 10216359002

Para mais informações sobre nossos produtos, instruções de uso e catálogos acesse nosso site:
www.zammi.com.br