




Instruções de montagem Transdutor descartável KMP

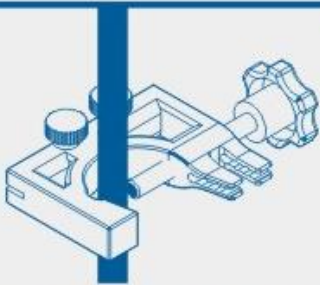

Acoplar o clamp no suporte de soro, ajustando o parafuso de maneira que firme.

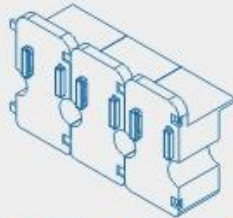


Encaixar as placas modulares entre si, acomodando de uma a quatro placas para cada clamp, conforme o número de transdutores que serão utilizados.

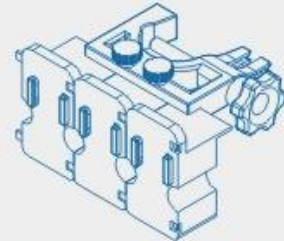

Ajustar as placas no clamp, inserindo a aba no encaixe e rosqueando os parafusos suavemente.



Conectar o cabo ao monitor específico.

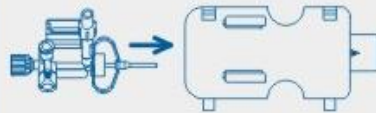

Encaixar o transdutor deslizando-o no trilho, observando que devido à trava de segurança só é possível encaixar na posição correta.



Inserir o conector com proteção contra respingos no encaixe do cabo, observando a seta indicadora, apertando até escutar o 'clic'.

Após preenchimento do sistema como solução estéril, conforme protocolo do hospital, aguarde 5 segundos para estabilização e realize o ajuste do zero:




Exponha o transdutor à pressão atmosférica girando a manopla da torneira do zero, fechando para a via do paciente.




Ajuste o zero no monitor conforme instruções do fabricante.



Retorne a manopla da torneira do zero para a posição inicial, com o OFF apontado para a saída lateral.
- O sistema está pronto para a monitorização da pressão do paciente.

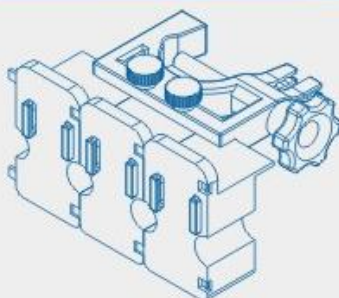

Realizar a limpeza dos acessórios utilizando um pano ligeiramente umedecido em uma solução detergente suave. Não deixar de molho ou colocar dentro d'água.

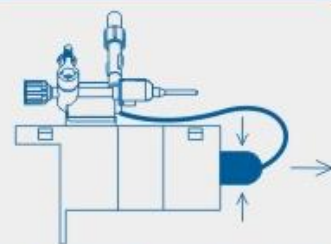

Para desmontar o sistema, aperte a trava do conector (na seta da cúpula contra respingos) e desencaixe o conector do transdutor.